

Kit Thử Nhanh Chẩn Đoán Thai Sớm

(hCG One Step Prefsnancy Test)

Dạng bào chế: Dạng bút thử

Thành phần hoạt chất , Hàm lượng/ 1Test Thử

Vị trí	Hoạt chất	Hàm lượng
Vùng cộng hợp	IgG chuột kháng hCGβ -7	0.225μg
	I gG thô	0.143μg
Vạch kết quả	IgG dê kháng hCGα	0.748μg
Vạch chứng	IgG dê kháng thô	0.660μg

Chỉ định : Kit thử sử dụng để định tính phát hiện HCG trong nước tiểu của người , giúp chẩn đoán phụ nữ có mang thai hay không

Liều dùng : 1 test thử cho một lần xét nghiệm. Chỉ sử dụng một lần rồi hủy

Bảo quản : bảo quản ở nhiệt độ phòng (2-30°C) Tránh làm đông băng sản phẩm

Cách dùng :

A. Lấy và bảo quản mẫu :

- Mẫu nước tiểu phải được đựng trong cốc nghiệm khô và sạch. Nước tiểu đầu tiên vào buổi sáng là tốt nhất vì nó thường có nồng độ hCG cao nhất. Tuy vậy, có thể lấy mẫu nước tiểu vào bất cứ thời điểm nào trong ngày. Các mẫu nước tiểu được cần phải được làm cho sạch bằng cách quay ty tâm, hoặc để cho lắng rồi mới làm xét nghiệm.
- Mẫu nước tiểu có thể bảo quản tối đa là 48 giờ trước khi xét nghiệm ở nhiệt độ 2 -8°C. Để bảo quản lâu hơn, Các mẫu nước tiểu phải được làm cho đông băng và giữ ở nhiệt độ dưới - 20°C . Mẫu đông băng phải được để cho tan ra hoàn toàn và lắc đều trước khi làm xét nghiệm

B. Quy trình xét nghiệm :

Đề các test thử, mẫu phẩm... ở nhiệt độ phòng (15-30°C) trước khi làm xét nghiệm

- Lấy test thử ra khỏi túi sản phẩm và sử dụng test thử càng nhanh càng tốt trong vòng 1 giờ
Mở nắp bảo vệ của bút thử ra để lộ đầu thấm. Giữ tay cầm bút thử, đầu thấm hướng xuống dưới . Đưa trực tiếp đầu thấm vào dòng nước tiểu trong khoảng thời gian khoảng 10 giây cho đến khi đầu thấm ướt hoàn toàn . Tránh để nước tiểu làm ướt thân bút và cửa sổ đọc kết quả. Đóng nắp bảo vệ lại và đặt bút thử trên mặt phẳng nằm ngang khô và sạch , cửa sổ đọc kết quả hướng lên trên và bắt đầu tính thời gian.

Lưu ý : có thể lấy nước tiểu vào 1 cốc sạch , rồi sau đó nhúng đầu thấm bút thử vào nước tiểu.

- Đợi cho đến khi các vạch đỏ xuất hiện trong cửa sổ đọc kết quả

Đọc kết quả trong vòng 3 phút

Lưu ý nồng độ hCG thấp có thể cho kết quả là vạch mờ ở vùng kết quả (T) sau khi đã kéo thêm thời gian chờ kết quả. Không sử dụng kết quả sau 10 phút

C. Đọc và diễn giải kết quả :

* **Dương tính :** Xuất hiện 2 vạch đỏ rõ rệt , một vạch là chứng (C) và một vạch là kết quả (T)

* **Lưu ý :** Độ đậm màu đỏ của vạch kết quả (T) sẽ khác nhau phụ thuộc vào nồng độ của hCG có trong mẫu phẩm. Tuy nhiên không thể dựa vào độ đậm màu mà để đánh giá định lượng cũng như tốc độ tăng lên của hCG.

* **Âm tính :** Xuất hiện chỉ một vạch chứng (C) . Không thấy xuất hiện vạch kết quả (T) dù đậm hay mờ.

KẾT QUẢ KHÔNG CÓ GIÁ TRỊ : Không thấy xuất hiện vạch chứng C . Nguyên nhân này thường gặp là do lượng mẫu phẩm không đủ hoặc thao tác xét nghiệm sai . Đọc lại hướng dẫn và làm lại xét nghiệm bằng kit thử mới khác. Nếu như tình trạng vẫn như cũ, hãy liên lạc với đại lý phân phối để được giải đáp.

Những điều cần tránh lưu ý khi sử dụng :

- Chỉ sử dụng kit thử cho xét nghiệm chẩn đoán Vi-trio. Không sử dụng kit thử đã hết hạn sử dụng
- Mặc bảo hộ y tế, bảo vệ mắt và dùng găng tay sử dụng một lần khi làm xét nghiệm
- Tuân thủ nghiêm túc các quy định , cảnh báo trong suốt quá trình tiếp xúc , xét nghiệm , tiêu hủy mẫu phẩm như với các chất dịch sinh học khác để tránh rủi ro lây nhiễm.
- Độ ẩm và nhiệt độ môi trường không đảm bảo có thể ảnh hưởng không tốt đến kết quả xét nghiệm
- Đề xa tầm với trẻ em

Hạn chế của kit thử :

- Kit thử nhanh chẩn đoán thai sớm Abon là dụng cụ xét nghiệm định tính.
- Mẫu nước tiểu quá loãng có khả năng không chứa đủ nồng độ hCG cần thiết để có thể phát hiện được . Nếu vẫn nghi ngờ có thai : sau 48 giờ tiếp theo , lấy mẫu nước tiểu đầu tiên vào buổi sáng và làm lại xét nghiệm
- Xét nghiệm bằng kit thử có thể cho kết quả dương tính giả
- Xét nghiệm bằng kit thử có thể cho kết quả âm tính giả
- Xét nghiệm này hoàn toàn có cơ sở trong việc chẩn đoán thai. Tuy nhiên kết luận khẳng định có thai phải do bác sỹ đưa ra sau khi đã xem xét các kết quả xét nghiệm và biểu hiện lâm sàng khác.

Hạn dùng : 24 tháng bảo quản trong túi kín . 1 giờ sau khi mở túi

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng sản phẩm trước khi dùng.

Sản xuất bởi : ABON BIOPHARM (Hangzhou) Co.,Ltd

Nhà máy tại Trung Quốc : #198 12th Street East , Hangzhou Economic & Technological Development Are, Hangzhou, 310018, P.R. China

Nhà nhập khẩu : CÔNG TY CỔ PHẦN Á CHÂU

Số 9 Lô 11A Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Nhà phân phối : CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO (CN TẠI TP.HCM)

112 Trần Hưng Đạo – Phường Phạm Ngũ Lão – Quận 1 – TP.HCM