

# Mixtard® 30 FlexPen®

Được thiết kế với kim tiêm NovoFine® hoặc NovoTwist®




Vạch chỉ đơn vị - thông báo lượng thuốc còn






Vạch chỉ, nút chọn, nút bấm giúp chọn chính xác liều tiêm

## Hướng dẫn sử dụng bút tiêm Mixtard® 30 Flexpen®


1 Làm ấm và đồng nhất thuốc

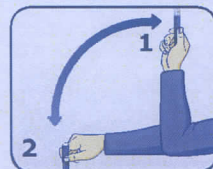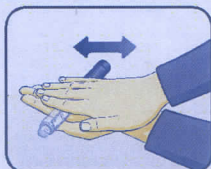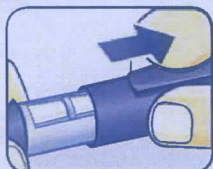


2 Gắn kim

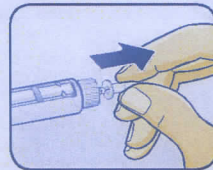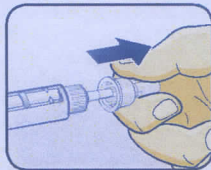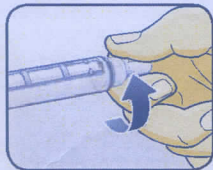

3 Đuổi bọt khí

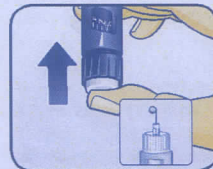

4 Định liều tiêm

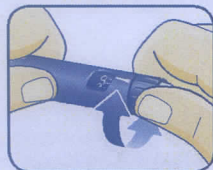

24 đơn vị



5 Tiêm thuốc



6 giây

